

# Bild- und Befundeinsicht - Bildeinsicht

Hier steht der **Name** des Patienten samt **Geburtsdatum**!

Hiermit **schließen** Sie das Fenster der **Bildeinsicht**.

Klicken Sie auf das jeweilige kleine Bild mit der linken Maustaste, halten Sie die Taste gedrückt und ziehen Sie das Bild, welches Sie betrachten möchten, in eines der größeren Anzeigefenster.

Anzeigefenster

WEB access > Bild- und Befundeinsicht > Bildeinsicht > TEST Statusupdate6 13.03.1975 schließen

20050829084454 MR

survSensHe .flair/A SE E.flair/A S t2/tse/C S E.t2/tse/C .art/3d/mc/ .hirnnerv/A E.hirnnerv/ E.hirnnerv/

Hangings: Default Layout: 1 Folder Scroll mit Mausrad

Bild 1 von 23 Bild 4 von 28

Folder0 Folder1

Bild 4 von 60 Bild 3 von 9


Folder2 Folder3

## Erklärung der Menüleisten

### Menüleiste links neben den Anzeigefenstern:

Alle Buttons funktionieren auf dieselbe Art und Weise.

Betätigen Sie einen der Button und klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste auf das Bild im Anzeigefenster und halten Sie die Taste gedrückt. Wie Sie weiter vorgehen entnehmen Sie bitte der Beschreibung neben dem Button.



Fahren Sie mit gedrückter Maustaste nach oben, unten, links und rechts um den **Kontrast** des Bildes zu **ändern**.


Fahren Sie mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten um den **Zoom** zu **verändern**.

Fahren Sie mit gedrückter Maustaste in die jeweilige Richtung in die Sie das **Bild verschieben** möchten.

Fahren Sie mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten um ein **Bild vorwärts oder rückwärts** zu **springen**.

Betätigen Sie diesen Button. Anschließend können Sie im Bild **Linien zur Messung zeichnen**. Bestimmen Sie hierfür mit der linken Maustaste einen Start- und Endpunkt für die Linie.

### Menüleiste unter Anzeigefenster:




Ein Bild vorwärts springen.

Ein Bild zurück springen.

Hiermit können Sie das Bild im Anzeigefenster aktualisieren.

Dies ist der **Synchronisierungs-Button**. Wenn Sie z.B. bei 2 Bildern diesen Button markieren, sind diese 2 Bilder mit einander synchronisiert. Wenn Sie nun bei einem der 2 Bilder eine Änderung vornehmen, wirkt sich dies auch auf das zweite Bild aus.

### Menüleiste über Anzeigefenster:



Wählen Sie ein Hangingprotokoll aus.

Aktualisieren Sie das Hangingprotokoll.

Wählen Sie das Layout für die Anzeigefenster aus.

Aktualisieren Sie das Layout der Anzeigefenster.

Markieren Sie diesen Button. Nun können Sie im Anzeigefenster mit dem Mausrad durch die einzelnen Bilder scrollen.